

プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル

歯科用暫間クラウン&ブリッジ

強靱さと審美性、テンポラリーマテリアルに求められる
2つの要素に3M ESPEがお応えします。

A2 カートリッジ



A3 カートリッジ



プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル スターターキット

内容 A2 カートリッジ 50mL 1本
A3 カートリッジ 50mL 1本
ギャラン™ ディスペンサー 10:1 1本
ギャラン™ ミキシングチップ ブルー16本×2組




通常希望医院価格 38,000円相当

希望医院価格 **24,000**円

製品番号:46953SP

- フィルテック™ シュープリーム フロー コンポジットレジンで修理・調整できます
- 即重レジンにてウォッシュすることができます
- 3M独自のナノフィラー化により従来の研磨は必要ありません
硬化後、アルコールでふき取るだけで滑沢性が得られます
- 高い発熱、臭いがありません
- 高い圧縮強さによりテンポラリークラウンの破折を減少させます
- オートミキシングによりチェアサイドで簡単に気泡の少ない
テンポラリークラウンを作製できます



■作業時間の目安

0秒	40秒	1分40秒	2分50秒	5分
スタディモデル又は 形成前に採得した 印象に充填 口腔内へ装着	口腔内で硬化 余剰ペースト除去	練和物と印象を 口腔内より除去	最終硬化	印象より除去 アルコールワッテで 拭き取り、仕上げ
				

※詳しくは、添付文書又はテクニックガイドをご参照下さい。

ボンディング材不要で接着するメカニズム


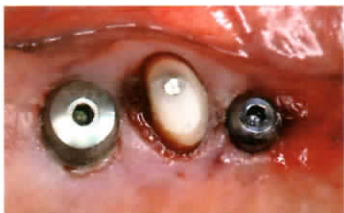


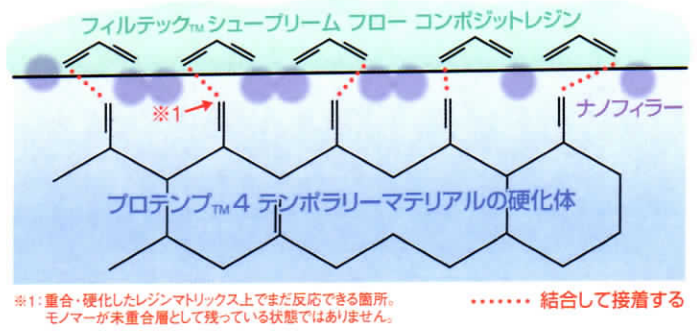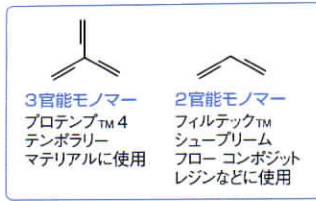



プロテンプ™4 テンポラリーマテリアルは、ナノフィラーとレジン結合の官能基が3箇所ある3M独自のモノマーを採用しています。硬化した状態においても未反応の官能基を有するため、補修・調整のレジン材料と結合でき、ボンディング材の使用なしでの接着を可能にします。



Case1 天然歯上顎6本 日高豊彦先生(川崎市ご開業)

 術前	 根管治療中に使用した1stプロビジョナルレストレーション	 5本の前歯を根管治療後、直接法にてファイバーコア築盛	 1stプロビジョナルレストレーションをシリコンにて概形印象を採得しプロテンプ™4 テンポラリーマテリアルを40秒間以内で注入する
 口腔内にて1分～2分保持	 口腔内から撤去後2分半～3分保持	 必要に応じてマージン部にフィルムテック™ シュープリム フロー コンポジットレジン塗布しウッシュする	 プロテンプ™4 テンポラリーマテリアルは研磨不要です。アルコールワットでふき取るだけつやが出ます

Case2 白歯部のインプラント埋入(即時負荷) 榎屋順一先生(長崎市ご開業)

 術前	 上顎左側白歯部にフラップレスにてインプラントを埋入。即時負荷のケースなので、インプラント間の天然歯を連結するデザインでプロビジョナルレストレーションを作製する	 埋入直後、予め準備していたシリコンコアにプロテンプ™4 テンポラリーマテリアルを注入	 口腔内で圧接。1～2分保持
 口腔内から撤去した状態。温水や冷水等に浸漬しない	 鋭利な先端のバーで余剰なバリのみ削合する	 バリの除去が終わったら、特に研磨せず、アルコールで軽く拭く	 即時負荷でのケースではプロビジョナルレストレーションのマテリアル自体に強度が求められる

販売名:プロテンプ™4 テンポラリーマテリアル 認証番号:221AKBZX00079000 一般的名称:歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ
 販売名:フィルムテック™ シュープリム フロー コンポジットレジン 認証番号:218AKBZX00110000

〈3M〉〈ESPE〉〈Pretemp〉〈プロテンプ〉〈ギヤラン〉〈フィルムテック〉は3M社またはその関連会社の商標です。希望医院価格はすべて本体価格です。

3M ESPE

スリーエム ヘルスケア株式会社
 歯科用製品事業部
 〒158-8583
 東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/hc/dental>

Please Recycle. Printed in Japan
 © 3M 2009. All rights reserved
 DEN-627-C(011050)IT

このカタログは、再生紙を使用しています。

株式会社 上村歯科商店
 神戸市須磨区多井畑字東山ノ上13番地の27
TEL (078) 743-4555(代)

当事業部取扱製品のお問い合わせは

3M ESPE コールセンター

0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)
 ※フリーダイヤルが繋がらない場合は、
 03-3709-9739をご利用ください。